


Produktinformation

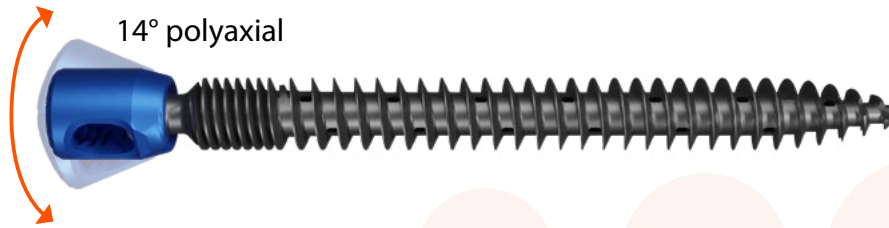

Produkt:	polyphem® Plus Iliosakraler Fixateur
Bereich:	Ilium
OP-Technik:	spondylodese klassisch offen mit Iliumverbindung
Material:	Titanlegierung Ti6Al4V
Implantate:	Steril verpackt

Features/Design

1. Geschlossener Schraubenkopf für mehr Stabilität
2. Alle Schrauben sind:
 - Kompatibel mit den 6,0 mm polyphem Stäben
 - Polyaxial
 - Selbststartend/-schneiden
 - Kanüliert, zementierbar
3. Übersichtliches Instrumentarium
4. Schrauben: Ø 10; Längen: 90 | 100 mm
5. Seitliche Konnektoren für komplexe Anatomie verfügbar

Wichtige Hinweise

1. Für den Zugang empfehlen wir eine robuste Nadel, vorzugsweise **Allstar(t)®** (SR-TB35-0100-S).
2. Bitte verwenden Sie immer einen **Führungsdraht**.
3. Bitte bohren Sie mit dem beiliegenden **Bohrer** (BF-117-050) immer vor.
4. Ziehen Sie beim Eindrehen der Schraube den Führungsdraht sukzessive heraus.
5. Bitte verwenden Sie zum Verschließen der Ilium Schrauben immer die passenden **selbstabbrechenden Muttern** (BF-0314009100).
 - Verwenden Sie hierbei den **polyphem Gegenhalter** (BF-117-040).

Bestellinformation

Implantate

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung
a	BF-0313010080S	Iliumschraube, kanüliert mit Zementlöchern Ø10x80, steril
a	BF-0313010090S	Iliumschraube, kanüliert mit Zementlöchern Ø10x90, steril
a	BF-0313010100S	Iliumschraube, kanüliert mit Zementlöchern Ø10x100, steril
b	BF-015902000S	Connector für Iliumschrauben Ø 6.5x20mm, steril
b	BF-015903000S	Connector für Iliumschrauben Ø 6.5x30mm, steril
b	BF-015904000S	Connector für Iliumschrauben Ø 6.5x40mm, steril
c	BF-0314009100S	Verschlussmutter für Iliumschrauben, selbstabbrechend, steril



Instrumente

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung
1	BF-117-060	Schraubendreher für Ilium Schrauben, selbsthaltend, kurz, Hex 3,5 mm
2	BF-117-040	Gegenhalter für Iliumschrauben, kurz
3	BF-117-030	Mutterndreher mit Haltefunktion, kurz
4	BF-102-204	T-Handgriff
5	BF-101-248	T-Handgriff mit Ratsche, für Ilium Schrauben
6	BF-117-050	Bohrer für Iliumschrauben, kanüliert, kurz, Ø 6 mm
7	BF-117-080	Nachdreher für Ilium Schrauben, Hex 3,5 mm
8	BF-117-070	Container für Ilium Instrumente

